
Instructies voor collectie speeksel

Tijdstip collectie?

Het speekselstaal moet afgenomen worden tussen 22u en middernacht.

Hoe doet u dit?

- Neem het speeksel af vóór u uw tanden poetst.
- Spoel uw mond met water gedurende 30 tot 60 seconden en spuw het water uit.
- Verwijder de dop van het Salivettebuisje
- Laat het wattenrolletje in uw mond vallen. Raak het niet aan met uw vingers.
- Kauw voorzichtig op het wattenrolletje of laat het in uw mond rondgaan om de speekselaanmaak te stimuleren gedurende ca 2 minuten (totdat u het gevoel heeft dat u het verzamelde speeksel niet langer meer in de mond kan houden).
- Spuw het wattenrolletje voorzichtig terug in het busje. Raak niet aan met uw vingers.
- Plaats de dop weer op het busje.
- Noteer datum en tijdstip van de speekselafname op het busje
- Bewaar het busje met speeksel in de koelkast tot u het terugbrengt naar het ziekenhuis en breng het zo mogelijk gekoeld mee.



Opmerking:

- Niet gebruiken bij een kind <3 jaar of bij personen met een verhoogd verslikingsgevaar.
- Watte is een natuurproduct. Verkleuring, onzuiverheden of donkere vlekken zijn mogelijk.