

1 Benodigheden

- Glucometer Accu-Check Inform II
- Teststrips voor Accu-Check Inform II
- Accu-Chek Performa controles L1 en L2

2 Werkwijze

Frequentie = 1x per dag 1 level (L1 en L2 altemnerend)

Opm: controle is enkel nodig indien een staal wordt gemeten.

1. Was de handen. Neem de strips altijd vast met propere handen.

2. Druk op de paarse aan/uit knop om het toestel aan te zetten.

Druk op ►. Het Gebruikers-ID scherm verschijnt.


Druk op 'Scan' en scan de barcode op uw personeelsbadge.



3. Druk op 'Controletest' en druk op het controlelevel (L1 of L2) dat je zal uitvoeren.

4. Neem de teststrip uit het potje. Sluit het potje onmiddellijk!

Schuif de teststrip met het goudkleurig contact in de meter wanneer de meter dit aangeeft.

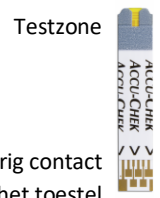

5. Wacht tot de knipperende druppel verschijnt.

Houd de controledruppel tegen de gele uitsparing in de testzone van de strip.

Na 5 seconden verschijnt het resultaat en de melding 'Bereik'/'Buiten bereik'.

➤ Indien 'Bereik' : druk op "✓" om te valideren.

➤ Indien 'Buiten bereik' : controleer in dit geval:

○ Controles verwisseld?

○ Controles vervallen? eens geopend zijn de controles 4 maanden houdbaar.

Vraag zo nodig nieuwe flesjes in het labo en bepaal opnieuw hetzelfde niveau.

○ Neem een nieuwe flacon strips.

Indien nog altijd niet OK: breng het toestel naar het labo.

Via de tekstballon kan een opmerking met het resultaat meegestuurd worden:

a. klik op de tekstballon en selecteer 1 van de 4 standaardopmerkingen;

b. voor ingave van een eigen opmerking: klik linksonder op de tekstballon met lijntjes.

Druk 2x op "✓" om te bevestigen. Het scherm komt terug op het '**Hoofdmenu**'.

6. Na de bepaling verschijnt het scherm "controletest" en kan de andere controle bepaald worden. Via de "pijltoets" keert men terug naar het Hoofdmenu.

7. Verwijder de gebruikte teststrip in de naaldcontainer.

8. Plaats de glucometer na gebruik stééds in het Docking Station.

Enkel zo worden de resultaten doorgestuurd naar het elektronisch patiëntendossier.

Indien problemen bij gebruik van de meter: neem contact op met het labo (7320).