

Nieuwe versie gezien geldigheid overschreden. Geen wijziging tov vorige versie.

1 Benodigheden

- Glucometer Accu-Check Inform II
- Teststrips voor Accu-Check Inform II
- Accu-Chek Performa controles L1 en L2
- Formulier voor registratie controleresultaten (voor week 1-26 of voor week 27-52)

2 Werkwijze

Frequentie = 1x per week, afwisselend level L1 en L2

Uitz: meters in spoedkoffers slechts 1x/maand gezien laag verbruik.

1. Was de handen. Neem de strips altijd vast met propere handen.
2. Neem een teststrip uit het potje en schuif deze met het goudkleurig contact in de meter. Sluit het potje onmiddellijk. De meter start automatisch op.



stap 2



stap 3



stap 4

3. Controleer of het codenr. op het display = het codenr. op de flacon teststrips.
Als je de weergave niet hebt gezien, neem de teststrip eruit en plaats deze opnieuw.
Het teststripsymbool en het knipperende bloeddruppel symbool verschijnen.
4. Neem de controle (level L1 of L2), verwijder de dop en veeg de punt af met kleenex. Knijp zacht in het flesje en houd de druppel tegen de uitsparing van de strip. Het resultaat wordt, met het symbool van het flesje en een knipperende "L", weergegeven. Verwijder de teststrip nog niet!
5. Druk 1x op ► om het resultaat te markeren als controle level 1, Druk 2x op ► om het resultaat te markeren als controle level 2.
Druk kort op ⏸ (aan/uit knop) om het level vast te leggen.
6. Het toegestane controlebereik staat vermeld op het flacon van de strips.
 - Indien controle OK zie je afwisselend "OK" en het resultaat.
 - Indien controle niet OK zie je afwisselend "Err" en het resultaat. Controleer in dit geval:
 - Controles verwisseld?
 - Controles vervallen? eens geopend zijn de controles 6 maanden houdbaar.
Vraag zo nodig nieuwe flesjes in het labo en bepaal opnieuw hetzelfde niveau.
 - Neem een nieuwe flacon strips.
Indien nog altijd niet OK: breng het toestel naar het labo
7. Verwijder de gebruikte teststrip in de naaldcontainer.
8. Vul het resultaat in op het controleformulier (weken 1-26 of weken 27-52).

De inhoud is overgenomen uit Glucometer Accu-Chek Performa – Handleiding (TOE-0044) v1.0