

Nieuwe versie gezien geldigheid overschreden. Geen wijziging tov vorige versie.

1 Benodigheden

- Glucometer Accu-Check Performa
- Teststrips voor Accu-Check Performa
- Prikpen Securjet Pro
- Ontvettingsmateriaal (ether) en niet-steriele compressen

2 Werkwijze

1. Is de patiënt een MRSA patiënt? Zo ja, haal in het labo een reservetoestel dat énkél en alleen voor MRSA patiënten wordt gebruikt. Breng dit toestel nadien steeds terug naar het labo !
2. Was de handen. Neem de strips altijd vast met propere handen.
Wrijf de vinger van patiënt droog met compres (onvet eerst met ether indien zeer vuil).



3. Neem een teststrip uit het potje en schuif deze met het goudkleurig contact in de meter. Sluit het potje onmiddellijk. De meter start automatisch op.
4. Controleer of het codenr. op het display = het codenr. op de flacon teststrips.
Als je de weergave niet hebt gezien, neem de teststrip eruit en plaats deze opnieuw.
Het teststripsymbool en het knipperende bloeddruppel symbool verschijnen.
5. Prik de patiënt aan met de Securjet Pro (zie specifieke instructies).
Houd de testzone tegen de bloeddruppel. Zodra ⌚ knippert, is er voldoende bloed opgezogen. Het resultaat wordt weergegeven.
6. Verwijder de gebruikte teststrip en het lancetje in een naaldcontainer.
De glucometer schakelt automatisch uit 5 seconden na het verwijderen van de teststrip.
7. Als het resultaat klinisch niet klopt of ongewoon hoog of laag is, herhaal de meting.
Als het resultaat wordt bevestigd, raadpleeg de arts. Neem fluoride-tube voor controle in labo.
8. Vul het resultaat, het tijdstip en je personeelsnr. (onder streepjescode op je badge) in op het 1^e blad van een aanvraagformulier. Voor éénzelfde patiënt mag je 1 aanvraagformulier de ganse dag gebruiken. Bezorg de aanvraag aan het labo.

Indien problemen bij gebruik van de meter: neem contact op met het labo (7320)

De inhoud is overgenomen uit Glucometer Accu-Chek Performa – Handleiding (TOE-0044) v1.0