


Opstartprocedure


- Neem de meter uit de docking unit.
- Aan/uit knop inhouden 
- Toestel start.

Patiënten test

- Kies het icoon “**Bloedtest**”



- Scan de patiënt ID door de enterknop in te houden. ‘**Onbekende patiënt**’ Verdergaan? → **OK**
- Scan QR code strips op het potje.

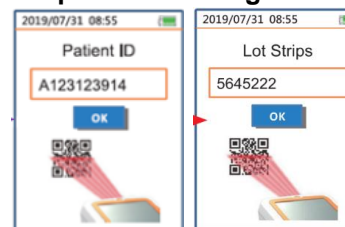


- Plaats strip.
- Bevestig patiënt ID en wacht tot de bloeddruppel op het toestel verschijnt.
- Voer de vingerprik uit.



- Hou de bloeddruppel tegen de applicatiezone (capillaire aanzuiging). Hou het toestel hierbij **horizontaal** om terugloop van bloed in de opening te voorkomen.



- Resultaat na 8 seconden.
- Accepteer/verwijder het resultaat.

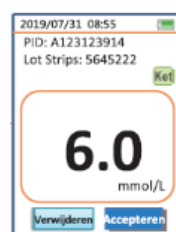

- Ejecteer de strip **met oranje schuifknop** aan zijkant van toestel (NIET uittrekken!)
- Plaats meter (aan) op base unit om verder op te laden.

