



Benodigdheden:

- Afinion 2 analysator
- Testcassette op kamertemperatuur
- Prikklancet Safety-Lancet Super van Sarstedt
- Niet-steriele compressen

Uitvoering:

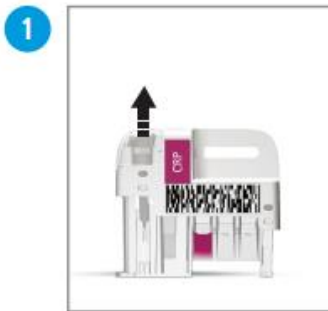

Trek het capillair recht omhoog uit de testcartridge.

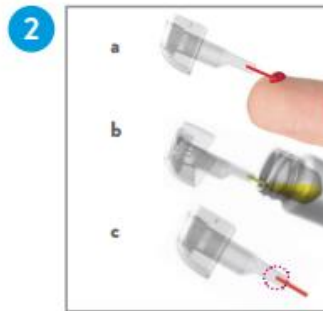

Vul het capillair volledig (c) met patiëntmonster (a) of controlemateriaal (b). Veeg het capillair niet schoon.



Plaats het capillair onmiddellijk terug. De analyse van de testcartridge moet binnen 1 minuut starten.



Raak  aan voor patiëntmonsters of  voor controlemateriaal. Het deksel wordt automatisch geopend.


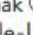


Plaats de testcartridge met de streepjescode naar links.




Sluit het deksel met de hand om de analyse te starten.



Raak  aan en voer de patiënt-ID in of raak  aan en voer de controle-ID in. Raak  aan om te bevestigen.



Noteer het resultaat wanneer het op het scherm verschijnt. Raak  aan om te aanvaarden. Het deksel wordt automatisch geopend.



Verwijder de gebruikte testcartridge en gooi deze weg. Sluit het deksel handmatig wanneer de analyzer niet in gebruik is.